




ART
AMINO ACID REPLACEMENT
THERAPY

JALUPRO®

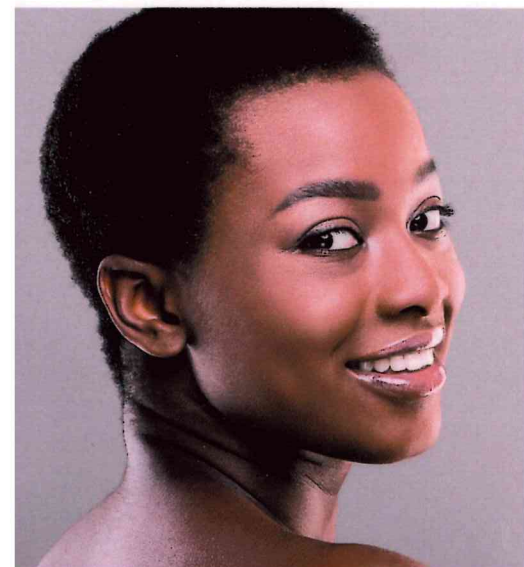

JALUPRO

una gamma completa per soddisfare
le esigenze di tutti i pazienti
fresca, sana e luminosa

SINCE
2005

OLTRE
10
MILIONI DI
TRATTAMENTI



JALUPRO

AA cluster HA LMW

- Corpo
- Collo e décolleté
- Protocollo Jalutox
- Contorno occhi
- Flessibilità in AA concentrazione



JALUPRO HMW

AA cluster HA HMW

- Biorivitalizzazione del viso
- Ringiovanimento delle labbra
- Collo e décolleté
- Mani



JALUPRO SUPERHYDRO

AA cluster potenziato
Peptidi HA LMW + HMW

- Bio restituzione dei legamenti
- Grave disidratazione e pelle stanca

IL COLLAGENE È LA SOLUZIONE PER UNA PELLE PIÙ COMPATTA

Si stima infatti, che durante l'età adulta si perde ogni anno circa l'1% del proprio collagene per cui, quando si raggiungono i 50 anni, si è già subita una perdita del 30% del collagene.

JALUPRO È UNA FORMULAZIONE UNICA PER UNA NEOSINTESI OTTIMALE DEL COLLAGENE



70% DELLA STRUTTURA DEL COLLAGENE

DÀ IMPULSO ALL'ATTIVITÀ METABOLICA DEI FIBROBLASTI, STIMOLANDONE LA PRODUZIONE E FAVORENDO LA SINTESI DI NUOVO COLLAGENE.



PROVEDONO A MANTENERE L'IDrataZIONE A LIVELLI OTTIMALI E CREANO UN'IMPALCATURA MOLECOLARE CHE RENDE LA PELLE PIÙ ELASTICA.

ATTRAVERSO UN CLUSTER DI AMMINOACIDI E ACIDO IALURONICO **JALUPRO** STIMOLA LA PRODUZIONE DI COLLAGENE DI TIPO1 ATTIVANDO I PROCESSI METABOLICI ED IL RIPRISTINO DELLA NORMALE STRUTTURA DEL DERMA.

SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE A 6 MESI DALLA CONCLUSIONE DEL PROTOCOLLO

*test effettuati su un campione di 200 pazienti



dei pazienti valutati si è dichiarato soddisfatto dopo 3 sedute



dei pazienti arruolati nello studio dichiara un miglioramento della luminosità e della texture cutanea.



afferma di aver migliorato la propria autostima a seguito del trattamento.



dei pazienti ripeterebbe il trattamento e consiglierebbe il protocollo



dei pazienti ritiene il trattamento tollerabile



ha riscontrato un miglioramento della qualità della vita

JALUPRO



Dispositivo Medico di Classe III

CE 0373

JALUPRO

JALUPRO

Restituisce luminosità e compattezza alle pelli atone, previene e riduce il rilassamento cutaneo (viso e corpo), attenua rughe sottili e segni d'espressione, previene l'elastosi, migliora l'aspetto di cicatrici (anche acneiche), cheloidi e smagliature rossastre

COME SI PRESENTA

2 flaconcini di aminoacidi liofilizzati (Glicina, L-prolina, L-lisina, L-leucina) 100 mg (A) e 2 fiale sterili di acido ialuronico 30 mg/3 ml (B).

INDICAZIONI D'USO

Il prodotto deve essere ricostituito: dissolvere la fiala con acido ialuronico (B) nel flaconcino di aminoacidi (A). Il risultato sarà una soluzione trasparente senza particelle, che garantisce una distribuzione uniforme e sicura dei principi attivi nelle aree desiderate. Il mix così ottenuto rappresenta la dose ideale per un trattamento completo (viso e collo o una parte delimitata del corpo).


JALUPRO È CLINICAMENTE TESTATO

FREQUENZA DEL TRATTAMENT JALUPRO

Un ciclo di 4-6 trattamenti 2-3 volte all'anno.

TECNICA INIETTIVA CONSIGLIATA

La soluzione può essere iniettata nel derma reticolare o papillare con ogni tecnica. Si consiglia di usare ago da 30 g.




JALUPRO CLASSIC

Jalupro Classic
da 1 a 1,25 ml per lato

Ponfi ogni 1,5 cm uniformemente
distribuiti sul viso

JALU-TOXIN PROTOCOLLO Prof. Luca Piovano

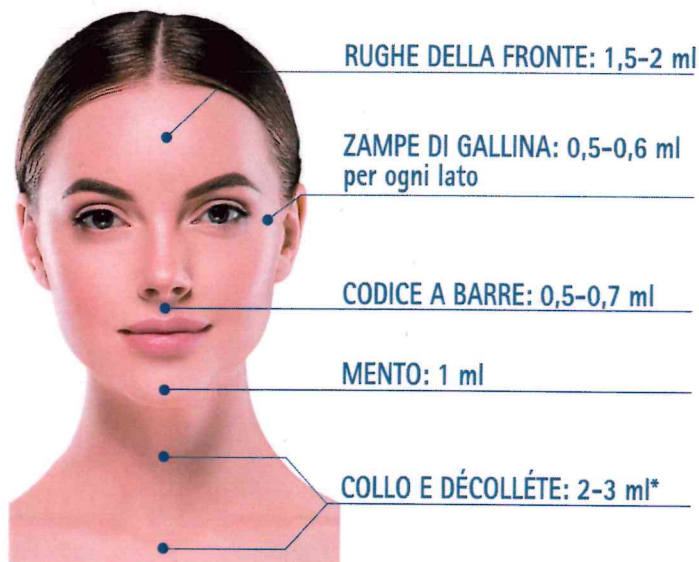

*Sul collo è possibile aumentare fino al doppio di UNITÀ di BTX

► Sugerito per trattare le seguenti zone:
RUGHE DELLA FRONTE (ESCLUSA GLABELLA), ZAMPE DI GALLINA, CODICE A BARRE, MENTO, COLLO E DÉCOLLÉTÉ

- 1** Diluire la tossina botulinica con soluzione salina (es. 50 U di Onabotulinum in 1,25 ml o 125 U di Abobotulinum in 0,63 ml)
- 2** Diluire **Jalupro®** come suggerito nelle istruzioni (3 ml di HA con polvere di aminoacidi liofilizzati)
- 3** Usare 2 siringhe luer-lock per miscelare **Jalupro®** e BTX: prendere 1 ml di **Jalupro®** in una siringa da 2,5 ml e 10-14 U di Onabotulinum o 20-35 U di Abobotulinum in una siringa da 1 ml, collegare le due siringhe con un connettore e miscelare
- 4** Iniettare il cocktail nel derma superficiale con la tecnica micropapule. Stesso numero di iniezioni su entrambi i lati per evitare asimmetria



NON RIPETERE JALU-TOXIN PRIMA DI 3 MESI

► VISO E COLLO CON PELLE ATONA, SEGNI DI CEDIMENTO: **JALUPRO®**



► LIEVE RILASSAMENTO INTERNO BRACCIA, COSCIA, GINOCCHIO E ADDOME: **JALUPRO®**



► Più iniezioni sono possibili secondo parere del medico.

JALUPRO HMW



Dispositivo Medico di Classe III

CE 0373

JALUPRO HMW

JALUPRO HMW

È stato studiato per svolgere un'azione biorivitalizzante nelle zone dove la pelle appare molto segnata (solchi, depressioni e rughe profonde, in particolare quelle di collo e décolleté).

COME SI PRESENTA

1 siringa di vetro monodose/monouso, apirogena, preriempita con 20 mg gel sterile di sodio Jaluronato (A), più un flaconcino da 80 mg di una soluzione sterile a base di aminoacidi (Glicina, L-prolina, L-lisina, L-leucina HCl) (B).

INDICAZIONI D'USO

Il prodotto deve essere ricostituito: dopo aver applicato sulla siringa un ago 27 G, iniettare il gel nel flaconcino degli aminoacidi, quindi agitare il flaconcino fino a ottenere una soluzione moderatamente viscosa. La quantità di prodotto da iniettare dipende da vari fattori (profondità dei solchi, entità delle depressioni ecc.) ed è a discrezione del medico.


JALUPRO HMW È CLINICAMENTE TESTATO

FREQUENZA DEL TRATTAMENTO JALUPRO HMW

Un ciclo di 4-6 trattamenti 2-3 volte all'anno.

TECNICA INIETTIVA

Il prodotto si adatta a qualsiasi tecnica iniettiva (lineare, a microponfi, a reticolo o a ventaglio). Si consiglia di usare ago da 30 g o la cannula.



0,2 ml

0,2 ml

0,1 ml

0,2 ml

0,1 ml

0,1 ml

0,1 ml

0,1 ml

0,1 ml

JALUPRO HMW

Jalupro HMW

1,25 ml per lato

9 punti di iniezione nel derma
medio profondo

CONSIGLI PER L'USO DI JALUPRO HMW

VISO CON PELLE ATONE, SEGNI DI CEDIMENTO: JALUPRO HMW



RUGHE MARIONETTA DAI 45-50 ANNI: JALUPRO HMW



SEGNI D'ESPRESSIONE DAI 30 ANNI: JALUPRO HMW



CORREZIONE OVALE DAI 50 ANNI: JALUPRO HMW



COLLANA DI VENERE DAI 45 ANNI: JALUPRO HMW



JALUPRO SUPERHYDRO



Dispositivo Medico di Classe III

CE 0373

JALUPRO SUPERHYDRO

Nuova formula brevettata
per una **pelle sana con strutture rinnovate**

POTENZIATO CON **7** CLUSTER FUNZIONALI DI AMINOACIDI
PER LA PRODUZIONE DI COLLAGENE

- ◆ Il nostro cluster ha un'elevata quantità di Glicina, Prolina e Lisina.
- ◆ Potenziato con Alanina e Valina per un'aumentata produzione di collagene. Elastina, Arginina e Leucina per ottenere un'idratazione ottimale.

3 PEPTIDI BIOMIMETICI PER L'ATTIVAZIONE IMMEDIATA
DEI FIBROBLASTI.


- ◆ Acetyl decapeptide-3 & Oligopeptide 24 per la crescita e l'attivazione cellulare
- ◆ Acetyl tetrapeptide-5 per una lunga e profonda idratazione e l'inibizione della glicazione

80 mg / 1 fiala (2,5 ml) DI ACIDO IALURONICO LIBERO


- ◆ 3.2% di acido ialuronico, in una miscela a basso ed altissimo peso molecolare (>2 Milioni Da) per una lunga e profonda idratazione, per la stimolazione dei fibroblasti e della produzione di fibre collagene

Il Tessuto connettivo è molto più che matrice extracellulare cutanea

I Legamenti
di Ritenzione sono fatti
di Collagene e con l'età
tendono a diventare lassi
a causa della fisiologica
degradazione

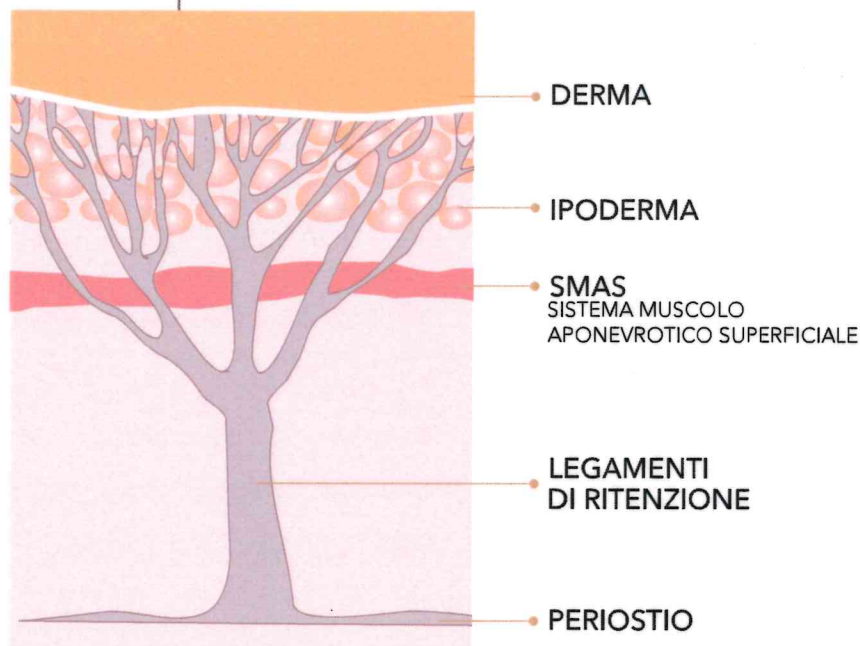

Nuova formulazione nella biorivitalizzazione della matrice extracellulare grazie all'azione dei Peptidi.

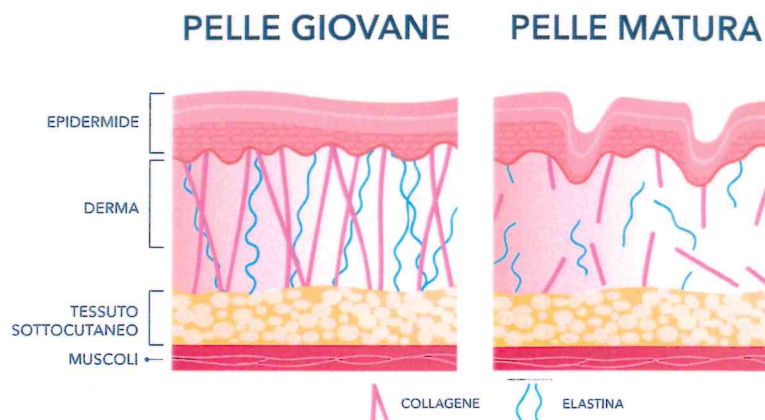

I cuscinetti adiposi (fat pads) sono fatti di cellule adipose e tessuto connettivo (collagene). Mantenere il collagene in salute migliora la struttura delle cellule adipose per un viso dall'aspetto più giovane





Ispessimento orbitale

Legamento zigomatico

Platisma fascia auricolare

Legamento
masseterino
superiore

Legamento masseterino

Setto mandibolare

Mento

JALUPRO SUPERHYDRO

Jalupro SUPER HYDRO

6 punti di iniezione con 0,2
+1 punto sul mento da 0,1

UN PROTOCOLLO EVOLUTO PER RINFORZARE I LEGAMENTI DI RITENZIONE

INFILTRAZIONI SUI LEGAMENTI: JALUPRO SUPERHYDRO



PELLI MOLTO DANNEGGIATE: JALUPRO SUPERHYDRO



PROTOCOLLO COMBINATO CON RADIOFREQUENZA ENDODERMICA: JALUPRO SUPERHYDRO



SuperHydro offre una valida opzione e una maggiore flessibilità per il trattamento dei pazienti.

distributore in Sicilia

a2medica

technology | efficiency | innovation

info@a2medica.com | +39 095 506244

www.a2medica.com



Professional Derma SA,
Riva A. Caccia, 1/d , 6900 | Lugano
Switzerland